



La protezione impermeabile sicura



**La protezione Dry Pro
è stata appositamente realizzata per
garantire totale impermeabilità agli
accessi venosi
(PICC)**






L'UNICA PROTEZIONE PICC SICURA AL MONDO

I prodotti Dry Pro sono realizzati in latex anallergico, materiale altamente resistente e di qualità, studiato per offrire la massima sicurezza durante una doccia rilassante, un bagno o una piacevole nuotata.


I Prodotti DRYPRO:

- MANTENGONO ASCIUTTI:
BENDAGGI, INGESSATURE, FERITE
ECC
- INDISPENSABILI PER L'IGIENE
PERSONALE
- CONSENTONO AI PAZIENTI DI
NUOTARE SENZA OSTACOLI E/O
IMPEDIMENTI
- PERMETTONO DI FARE RIABILI-
TAZIONE IN ACQUA.

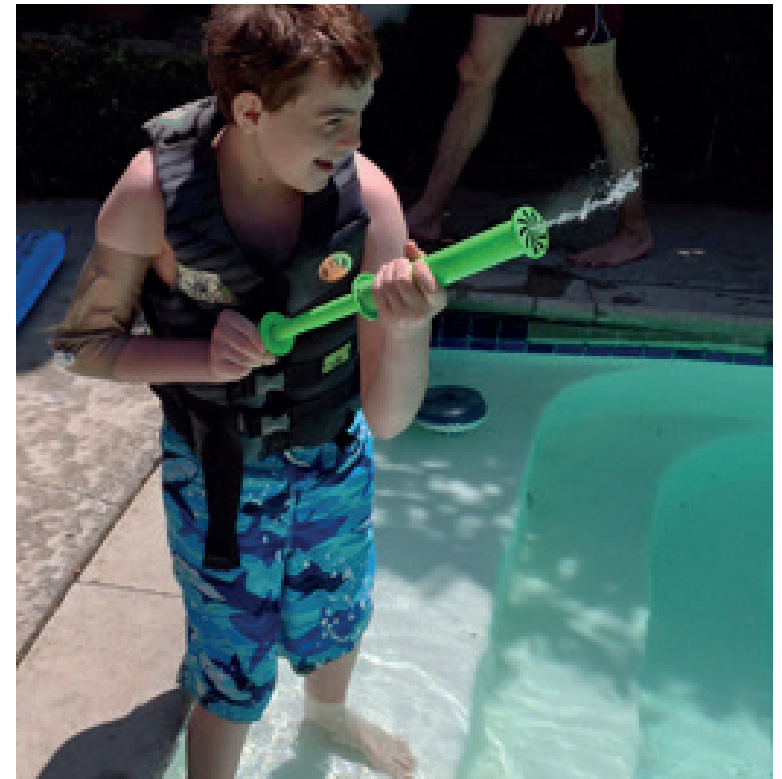

COME SI INDOSSA:

1. Distendere la protezione sopra il braccio per vedere come si adatta, se la protezione è troppo stretta fare un taglio netto orizzontale lungo le linee tratteggiate. Fare attenzione a non tagliare troppo e assicurarsi che intorno al braccio ci sia una perfetta aderenza. Fare attenzione con unghie o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il protettore

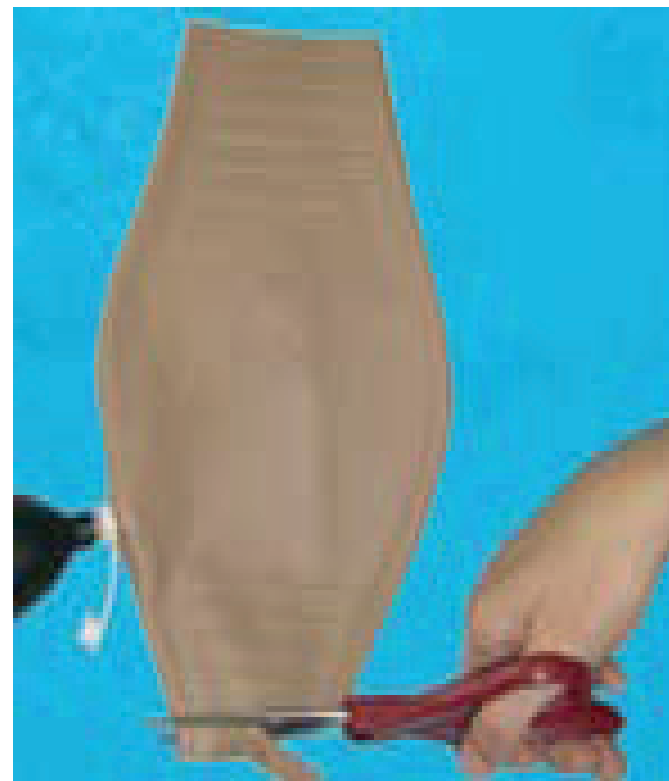

2. Trascinare la protezione fino a che la zona interessata non è completamente coperta. Assicurarsi che gli estremi aderiscano perfettamente alla pelle senza piegature o arricciature. Posizionare la protezione su avambraccio e bicipite



3. Aspirare tutta l'aria finchè la pompetta non diventa piatta, quindi rimuoverla e chiudere la valvola di sicurezza

N.B. Per rimuoverla è sufficiente allargare la protezione e lasciare entrare l'aria




COME MISURARE

STEP 1: misurare la circonferenza del braccio 2 cm al di sotto il Picc o sotto la medicazione, facendo attenzione a non prendere la misura direttamente sul gomito.



STEP 2: misurare la circonferenza del braccio 2 cm al di sopra il Picc o sopra la medicazione, facendo attenzione a non prendere la misura direttamente sul gomito.

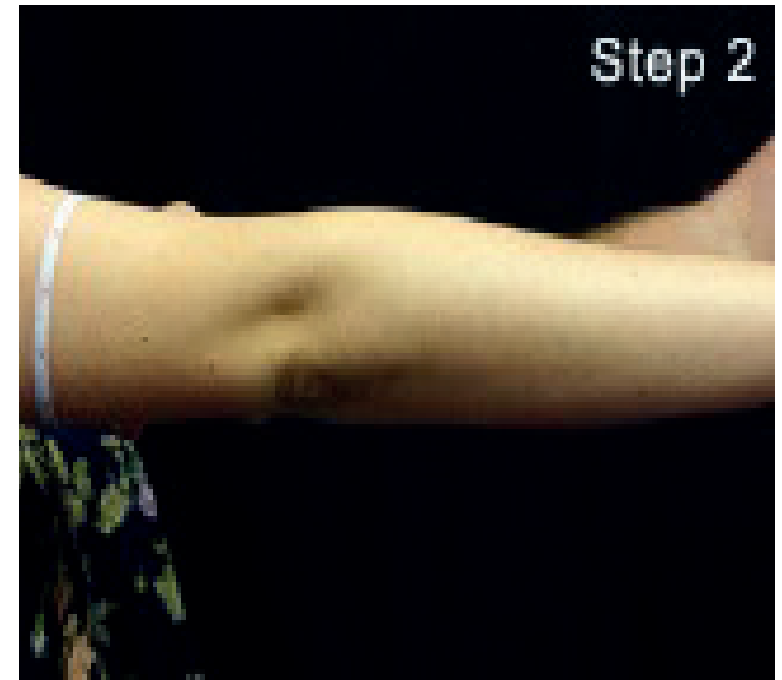

GUIDA ALLE TAGLIE

Dopo aver misurato in modo corretto la circonferenza dell'avambraccio e del bicipite, assicurarsi che le misure di circonferenza rientrino negli intervalli di misura riportati nella tabella, quindi selezionare la taglia corrispondente.

PRODOTTO PICC	MODELLO	CIRCONFERENZA (CM)	LUNGHEZZA (CM)
X-SMALL	PC- 11	15 – 23	13 – 20
SMALL	PC- 13	20 - 28	15 – 23
MEDIUM	PC- 15	28 – 33	18 – 25
LARGE	PC- 17	30 - 38	20 – 28
X-LARGE	PC- 19	36 +	23 +



GUIDA ALLE TAGLIE

Per far sì che la protezione sia perfettamente aderente al braccio, una volta arrivata a casa e dopo averla indossata, se risulta troppo stretta, tagliare lungo le apposite linee, facendo attenzione a non tagliare troppo. Avrete così una protezione ad hoc per ogni braccio!

**Disponiamo anche
di protezioni imper-
meabili per:
colostomia-
ileostomia e protesi
fissa della gamba.**





CONCLUSIONI

I prodotti DryPro sono brevettati per immergersi in acqua e sono realizzati in lattice chirurgico di alta qualità.

Grazie alla chiusura sottovuoto a tenuta stagna, aderiscono perfettamente e garantiscono una protezione impermeabile.*

Sono estremamente confortevoli e affidabili durante un bagno, una doccia, o un' energica nuotata.

Permettono di fare riabilitazione in acqua agevolmente e in sicurezza e riducono il rischio di complicazioni nelle ferite, mantenendo asciutta la parte interessata.

Tutti i prodotti DryPro sono conformi alle norme BS EN ISO 1497:2001 e soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE.

***non provocando l'effetto vacuum**



CONTATTI:

**INDIRIZZO: Via Fabio Massimo 88, 00192, Roma
(RM)**

TEL: +39 06 3232566

FAX: + 39 06 3220501

E-MAIL: info@dryproitalia.it

SITO WEB: www.dryproitalia.it

P.IVA: 12061631003

NUMERO REA: RM1347290