

Nota Tecnica

SwabCap®

DESCRIZIONE: SwabCap® è concepito per essere usato sui connettori valvolati per coprire e proteggere il raccordo luer valvolato dalla potenziale contaminazione. The SwabCap® agisce come una barriera fisica alla contaminazione tra gli accessi alle linee venose ed inoltre serve come disinfettante prima dell'accesso alla linea venosa. SwabCap® disinfetterà la valvola in cinque (5) minuti dall'applicazione ed agisce come barriera fisica dall'applicazione fino a novantasei (96) ore in condizioni normali e se non rimosso.

NUMERI DI CODICE: SCXT3-2000

METODO DI STERILIZZAZIONE: Gamma radiation

DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: Due anni

SITO DI PRODUZIONE: Excelsior Medical, 1933 Heck Ave.,
Neptune, NJ 07753

CERTIFICATO CE: 0120

ENTE CERTIFICATORE: SGS United Kingdom, Ltd. 202B Worle
Parkway Weston-super-Mare BS22 6WA, U.K

CLASSE: IIa

CONFEZIONAMENTO: 200 cappucci singolo uso per scatola – 10 scatole per cartone.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Spugna di tipo medicale contenente Alcool isopropilico al 70% come disinfettante

- Singolo uso

- Confezionato individualmente, sterile
- Il design della filettatura previene l'evaporazione dell'alcool

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicazione

1. Dopo che il flush/lock è stato effettuato, ispezionare l'integrità della confezione della copertura protettiva dell'alloggiamento dello SwabCap[®].
2. Rimuovere il coperchio protettivo tirando la linguetta .
3. Non rimuovere lo SwabCap[®] dall'alloggiamento bianco in plastica.
4. Tenere in una mano il connettore valvolato mentre si spinge e si ruota lo SwabCap[®] in senso orario sul luer del connettore valvolato.
5. Dopo che lo SwabCap[®] è stato avvitato in sede, ritirare gentilmente il suo alloggiamento bianco allontanandolo dal connettore valvolato.
6. Verificare che lo SwabCap[®] sia stato ben avvitato sul dispositivo e che il connettore valvolato sia connesso efficacemente. Stringere se necessario.
7. SwabCap[®] disinfetterà la valvola in 5 minuti dalla applicazione ed agirà come una barriera fisica alla contaminazione per un tempo fino a 96 ore in condizioni normali e se non rimosso. I connettori valvolati devono essere sostituiti come da linee guida istituzionali o secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante.

Rimozione

1. Bisogna usare una tecnica di rimozione a due mani per essere sicuri che il connettore valvolato non venga rimosso non intenzionalmente.
2. Per rimuovere, afferrare il connettore valvolato e ruotare lo SwabCap[®] in senso anti-orario rispetto alla valvola.
3. Rimuovere lo SwabCap[®] e buttare.
4. Ispezionare il connettore valvolato per verificare che sia connesso solidamente al catetere.
5. La valvola è pronta per l'accesso. Non è necessario strofinare ulteriormente.

Precauzioni.

Non usare se la confezione è danneggiata o aperta prima dell'uso.

Non usare se il prodotto non è inumidito dall'alcool.

Singolo uso solo.

Da usare su prescrizione medica.

Privo di lattice.

DHEP-privo.

Non congelare.

Usare entro la data di scadenza scritta sulla confezione.

La tecnica di rimozione a due mani è necessaria solo per essere sicuri che il connettore valvolato non venga rimosso non intenzionalmente.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

N/A