

Nota Tecnica

SwabFlush™

DESCRIZIONE:

La siringa di lavaggio è ideata per il lavaggio dei cateteri endovenosi e dei deflussori endovenosi. SwabCap® è concepito per essere usato sui connettori valvolati per coprire e proteggere il raccordo luer valvolato dalla potenziale contaminazione. Lo SwabCap® agisce come una barriera fisica alla contaminazione tra gli accessi alle linee venose ed inoltre serve come disinfettante prima dell'accesso alla linea venosa. SwabCap® disinfetterà la valvola in cinque (5) minuti dall'applicazione ed agisce come barriera fisica dall'applicazione fino a novantasei (96) ore in condizioni normali e se non rimosso. Lo SwabFlush™ è fornito come:

siringa da 10 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato

siringa da 5 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato

siringa da 3 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato

NUMERI DI CODICE:

siringa da 10 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato -
E0103-01

siringa da 5 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato -
E0103-55

siringa da 3 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato -
E0103-35

METODO DI STERILIZZAZIONE:

SwabCap: radiazioni Gamma

Siringa per lavaggio: Vapore

SCADENZA: Due anni

SITO DI PRODUZIONE: Excelsior Medical, 1933 Heck Ave., Neptune, NJ

07753

Certificato CE: 0120

ENTE CERTIFICATORE:

SGS United Kingdom, Ltd. 202B Worle Parkway Weston-super-Mare BS22 6WA, U.K

CLASSE: IIa

CONFEZIONE:

siringa da 10 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato – 100 unità per scatola/600 unità per cartone

siringa da 5 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato – 100 unità per scatola/600 unità per cartone

siringa da 3 ml. riempita con soluzione salina e SwabCap® integrato – 100 unità per scatola/600 unità per cartone

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SwabCap®:

- Spugna di tipo medicale contenente Alcool isopropilico al 70% come disinfettante
- Singolo uso
- Confezionato individualmente, sterile
- Il design della filettatura previene l'evaporazione dell'alcool

Siringa per lavaggio:

- -Terminally sterilized
- -Dose unitaria – pronta per l'uso
- -Superior barrel and label clarity

ISTRUZIONI PER L'USO:

PER IL LAVAGGIO ENDOVENOSO

Usare in modo asettico – solo per il lavaggio endovenoso. Seguire le linee guida CDC e le procedure della vostra istituzione per la somministrazione del lavaggio

endovenoso.

1. Ispezionare l'integrità della confezione compreso l'involucro protettivo, della siringa e della punta del cappuccio. Non Usare se la confezione è danneggiata, se la siringa perde o se la punta del cappuccio non è ben attaccata alla siringa.
2. Lo SwabCap[®] integrato nello stantuffo della siringa e non utilizzato dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per coprire il connettore valvolato una volta che è stato lavato usando la siringa SwabFlush[™].
3. Rimuovere l'involucro protettivo.
4. Ispezionare visivamente la siringa e la soluzione. Non usare se torbida o opaca. Non usare se la siringa o il cappuccio è danneggiato, se la siringa perde o se il cappuccio non è ben attaccato alla siringa.
5. **spingere sullo stantuffo con il cappuccio attaccato per rompere il sigillo tra lo stantuffo ed il lato del fusto della siringa creata by terminal sterilization**
6. Se lo SwabCap[®] è presente sulla valvola, rimuovere e gettare.

SwabFlush Precauzioni:

Se è in dubbio la compatibilità, consultare la letteratura appropriata specializzata. **Non usare se la soluzione è scolorita o contenete precipitati.**

Lo SwabCap[®] non utilizzato integrato nello stantuffo della siringa dovrebbe essere riservato per coprire il connettore valvolato una volta che esso è stato lavato usando la siringa SwabFlush[™].

Lattice in gomma naturale e sostanze preservative non sono state usate nella produzione di questo dispositivo.

Per rimuovere lo SwabCap[®]

- Bisogna usare una tecnica di rimozione a due mani per essere sicuri che il connettore valvolato non venga rimosso non intenzionalmente.
- Per rimuovere, afferrare il connettore valvolato e ruotare lo SwabCap[®] in

senso anti-orario rispetto alla valvola.

- Rimuovere lo SwabCap[®] e buttare.
 - Ispezionare il connettore valvolato per verificare che sia connesso solidamente al catetere.
 - La valvola è pronta per l'accesso. Non è necessario strofinare ulteriormente.
7. Se lo SwabCap[®] non è presente sul connettore valvolato o non è stato su di esso negli ultimi 5 minuti, la valvola potrebbe non essere pienamente disinfettata. Disinfettare la superficie della valvola secondo il protocollo dell'ospedale prima di accedere alla valvola con la siringa.
 8. Rimuovere il cappuccio dall'estremità della siringa.
 9. Tenere la siringa con la punta verso l'alto, picchiettare lateralmente per far salire eventuali bolle, applicare a mantenere una pressione sullo stantuffo finché esso non raggiunge il livello desiderato e l'aria è espulsa dalla siringa. La soluzione salina per lavaggio dovrebbe essere somministrata al paziente immediatamente dopo che sono state espulse le bolle d'aria dalla siringa.
 10. Usare il lavaggio in linea con eventuali avvertimenti o precauzioni appropriate per il farmaco in corso di somministrazione. Non usare se la compatibilità è in dubbio. Usare in accordo con le raccomandazioni del produttore del set endovenoso e del dispositivo di impianto.
 11. Somministrare attraverso il sito appropriato una quantità di soluzione per mantenere la pervietà del dispositivo di accesso venoso.

Raccomandazione: è raccomandata la somministrazione lenta per minimizzare il riscontro di un gusto sgradevole per il paziente.

12. Dopo la somministrazione del lavaggio; buttare qualunque eventuale rimanenza di soluzione contenuta nella siringa prima di usare lo SwabCap[®]. Assicurarsi che lo stantuffo sia del tutto immerso nella siringa.

Per applicare lo SwabCap[®]:

13. Ispezionare l'integrità della confezione protettiva dello SwabCap® sull'estremità dello stantuffo della siringa. Non usare se la confezione è danneggiata o aperta prima dell'uso. Non usare se lo SwabCap® non è più bagnato dall'alcool. Rimuovere la copertura protettiva dello SwabCap® tirando la linguetta.
14. Non rimuovere lo SwabCap® dallo stantuffo della siringa.
15. Orientare l'estremità aperta dello stantuffo che contiene lo SwabCap® direttamente verso il connettore valvolato
16. Tenere in una mano il connettore valvolato mentre si spinge e si ruota lo SwabCap® in senso orario sul luer del connettore valvolato.
17. Dopo che lo SwabCap® è stato avvitato in sede, ritirare gentilmente il suo alloggiamento bianco allontanandolo dal connettore valvolato.
18. Verificare che lo SwabCap® sia stato ben avvitato sul dispositivo e che il connettore valvolato sia connesso efficacemente. Stringere se necessario.
19. SwabCap® disinfetterà la valvola in 5 minuti dalla applicazione ed agirà come una barriera fisica alla contaminazione per un tempo fino a 96 ore in condizioni normali e se non rimosso. I connettori valvolati devono essere sostituiti come da linee guida istituzionali o secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante.
20. **Solo per Singolo Uso** – Buttare la siringa.

Precauzioni per lo SwabCap®.

Non usare se la confezione è danneggiata o aperta prima dell'uso.

Non usare se il prodotto non è inumidito dall'alcool.

Singolo uso solo.

Da usare su prescrizione medica.

Privo di lattice.

DHEP-privo.

Non congelare.

Usare entro la data di scadenza scritta sulla confezione.

La tecnica di rimozione a due mani è necessaria solo per essere sicuri che il connettore valvolato non venga rimosso non intenzionalmente.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

N/A