


**MEDICAZIONE
PER CATETERE VENOSO PERIFERICO (CVP)**

3M™ TEGADERM™ IV 1633 (cm 7 x 8,5 – medicazione trasparente in poliuretano e rinforzi in poliestere con strisce sterili per il fissaggio della cannula – indicato anche per cateteri arteriosi)

Prima di applicare la medicazione trasparente lasciare asciugare il disinfettante precedentemente applicato ed accertarsi che la cute sia perfettamente asciutta

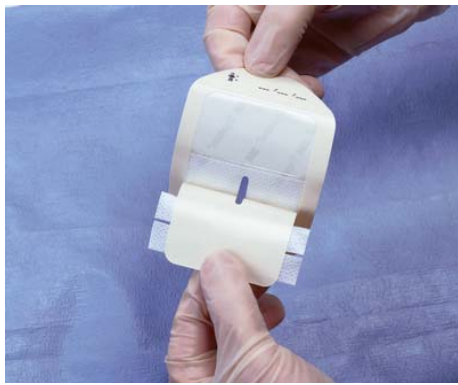


Aprire la confezione.
Rimuovere il liner centrale di carta e posizionare la medicazione sulla confezione sterile



Rimuovere le strisce sterili dal liner



Usare le strisce sterili per fermare l'agocannula, con o senza alette o per proteggere la cute

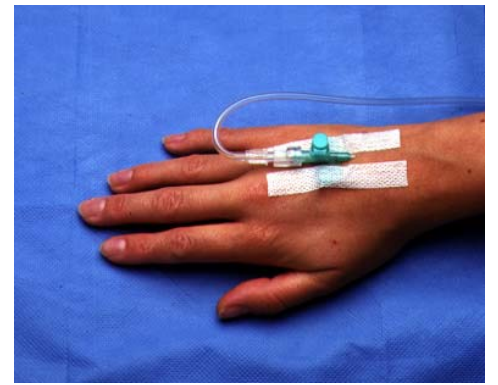

Rimuovere il liner di carta stampato esponendo la superficie adesiva.



Posizionare la medicazione sul sito d'inserzione del catetere in modo che il taglio sia in corrispondenza del raccordo o della porta dell'agocannula, lasciando visibile il sito di inserzione.



Far aderire la medicazione premendo leggermente dal centro verso i bordi.



Sovrapporre i due lembi in TNT sotto il catetere in modo da sigillarla intorno ad esso



Rimuovere la cornice di carta dai contorni della medicazione e far aderire i bordi premendo ai lati del catetere



Usare l'etichetta in Micropore per registrare la data della medicazione

TECNICA DI RIMOZIONE



Togliere le eventuali strisce sterili, sollevare i bordi sovrapposti in TNT e tirare delicatamente la medicazione verso il paziente stesso e non verso l'alto.



Infine massaggiare l'intera superficie della medicazione una volta applicata sulla cute.