



CATETERISMO VASCOLARE
PICC cateteri centrali a inserimento periferico

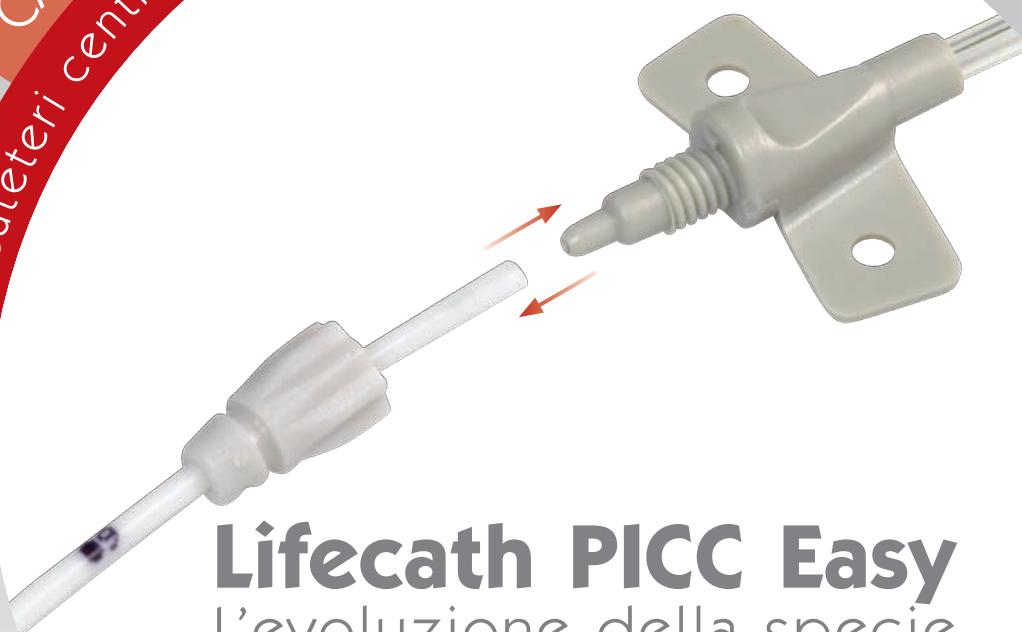

Lifecath PICC Easy
L'evoluzione della specie

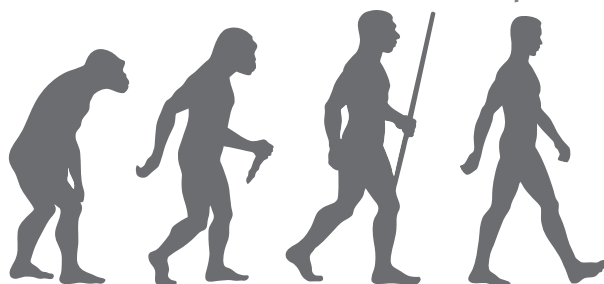

Value Life

● Lifecath Picc Easy: i vantaggi di un raccordo amovibile

Lifecath PICC Easy è un set con catetere PICC in poliuretano con prolunga e alette di fissaggio rimovibili indicato per terapia I.V. a medio-lungo termine.

VANTAGGI

- Possibilità di tagliare il catetere dopo il posizionamento semplificando la manovra
- Il taglio prossimale preserva la rastrematura della punta diminuendo i rischi di trombosi

Raccordo amovibile

Consente di eseguire il taglio del catetere dopo aver confermato il corretto posizionamento della punta, senza necessità di estrarlo

Fissaggio Grip-Lok®

Specificamente concepito per il fissaggio stabile e confortevole del catetere Lifecath PICC Easy (disponibile anche singolarmente con il cod. 5804.10)

Aletta provvisoria

Le dimensioni ridotte e l'assenza di prolunga agevolano la manovra di posizionamento

Bionector®

Sistema needleless latex free a circuito chiuso con flusso lineare e flush neutro

Punta rastremata

Riduce il rischio trombotico. La marcatura distale consente di verificare la completa estrazione del catetere dopo la rimozione

Marcatura


Marcatura centimetrica numerica per un'agevole e immediata lettura della lunghezza introdotta

● Posizionamento: i vantaggi di una tecnica ECG

La tecnica si basa sulle modificazioni morfologiche e di ampiezza che subisce l'onda P quando il catetere, fungendo da elettrodo intracavitario, si avvicina all'atrio destro.

VANTAGGI

- Consente di verificare e correggere la posizione della punta in tempo reale
- Elimina la necessità di eseguire RX anche ripetuti (linee guida ESPEN 2009)
- Consente l'immediato utilizzo del PICC dopo il posizionamento
- Verifica post-impianto, in ogni momento è possibile accertare un eventuale malposizionamento

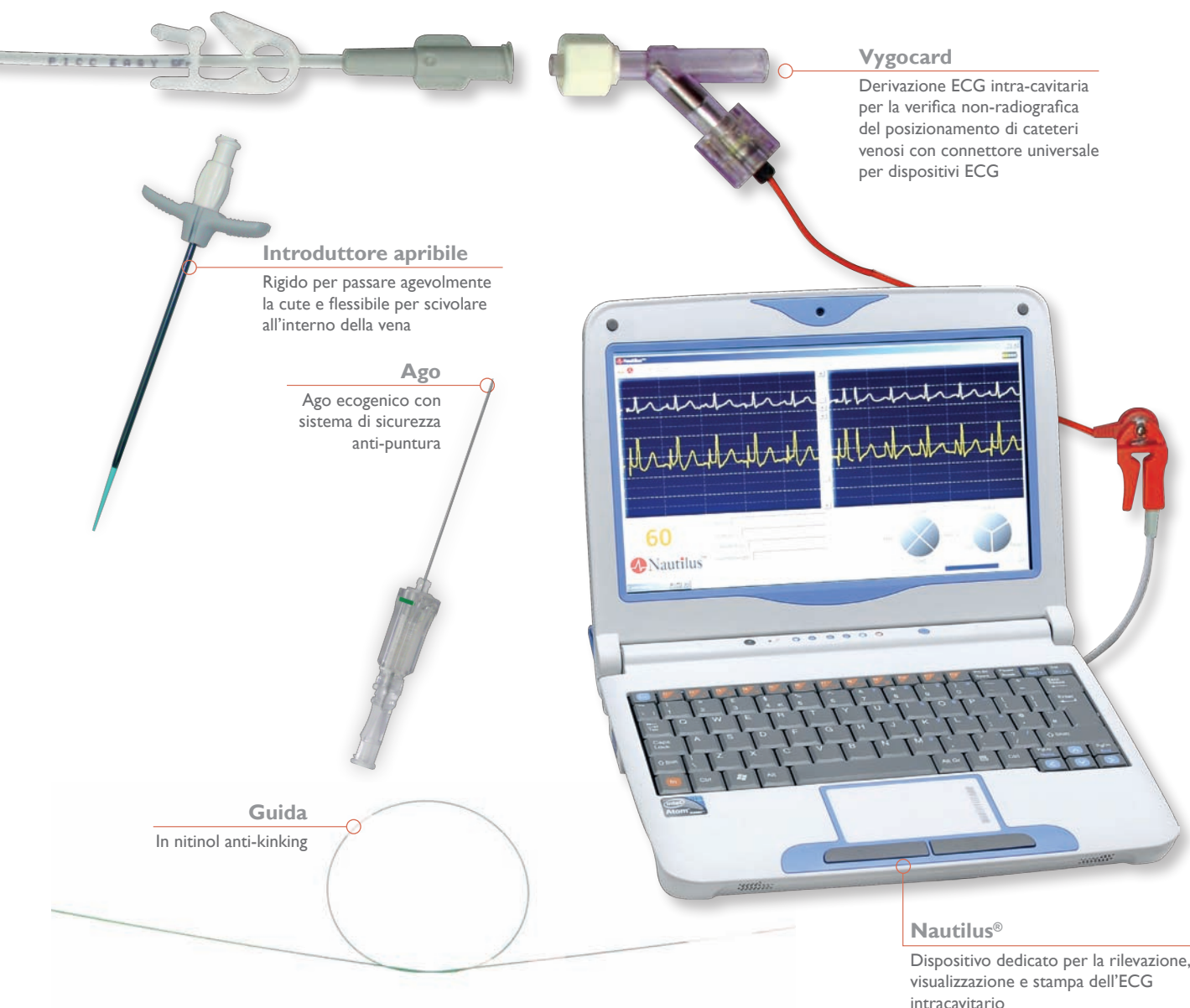

Vygonard

Derivazione ECG intra-cavitaria per la verifica non-radiografica del posizionamento di cateteri venosi con connettore universale per dispositivi ECG

Introduttore apribile

Rigido per passare agevolmente la cute e flessibile per scivolare all'interno della vena

Ago

Ago ecogenico con sistema di sicurezza anti-puntura

Guida

In nitinol anti-kinking

Nautilus®

Dispositivo dedicato per la rilevazione, visualizzazione e stampa dell'ECG intracavitario

Referenze bibliografiche

PICC e Ecoguida

The Risk of Bloodstream Infection in adults with different Intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Maki G. et al., Mayo Clin Proc, 2006.

The use of ultrasound to improve practice and reduce complication rates in peripherally inserted central catheter insertions: final report of investigation. Stokowski G. et al. Journal of Infus Nurs., 2009.

Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-analysis of the literature. Randolph AG et al. Crit Care Med., 1996.

Tecnica ECG

The intracavitary ECG method for positioning the tip of central venous catheters: results of an Italian multicenter study. Pittiruti M. et al. The journal of vascular access. 2012 Feb 8.


Electrocardiogram (EKG) Guided Peripherally Inserted Central Catheter Placement and Tip Position: Results of a Trial to Replace Radiological Confirmation. Nancy L. Moureau et al. JAVA 15-1-3 2010.

ESPEN Guidelines on parenteral nutrition: Central Venous catheters. Clinical nutrition. 2009;

Lifecath PICC Easy

Set con catetere PICC e accessori per il posizionamento con tecnica microSeldinger

Codice	CATETERE		INTRODUTTORE		AGO		GUIDA	
	Lungh.	Ø	L.	per cateteri di Ø	L.	Ø	L.	Ø
0EM2.386	60 cm	3 Fr	7 cm	3 Fr	7 cm	21 G	50 cm	0.46 mm
0EM2.387	60 cm	4 Fr	7 cm	4 Fr	7 cm	21 G	50 cm	0.46 mm
0EM2.388	60 cm	5 Fr	7 cm	5 Fr	7 cm	21 G	50 cm	0.46 mm

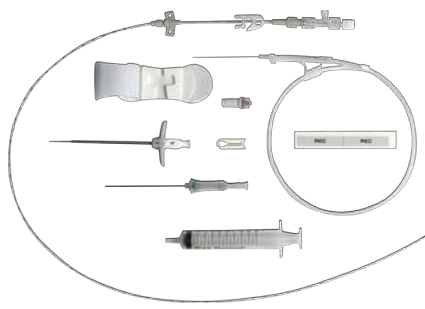

Disponibili su richiesta kit per la sostituzione della prolunga

Nautilus®

Sistema completo per la rilevazione del corretto posizionamento di cateteri venosi mediante la visualizzazione e stampa dell'ECG intracavitario

Codice	Descrizione
CNS01	Unità centrale, telecomando, mini-stampante, alimentatori, valigetta.



Dispositivi per derivazione ECG intra-cavitaria

In associazione ad un sistema ECG (es. Nautilus) consentono la verifica non-radiografica del posizionamento di cateteri venosi

Codice	Nome	Tipologia	Connessione catetere	Illustrazione
9164.002	Vygocard	per colonna salina	Luer lock	
SA01	Nautilus S	per colonna salina	Luer slip	

Basic Set - Codice 80199.541

Include un coprisonda e il gel acustico sterile per effettuare una venipuntura ecoguidata.

Teli Finestrati Adesivi - Codici vari

Per agevolare l'impianto e preservare l'asepsi.

Pack assemblati - Codici vari

I dispositivi descritti in questa pagina sono ordinabili singolarmente o possono essere inclusi all'interno di un pack contenente più dispositivi e ordinabile con un unico codice e confezionamento.



cod. Axxxxxx
PICC EASY pack

- 1 Lifecath PICC Easy cod. 0EM2.387
- 1 Basic Set per sonda ecoguidata cod. 80199.541
- 1 Vygocard derivazione ECG cod. 9164.002
- 1 Telo 75x75 cm finestra adesiva Ø 8cm cod. 34.75.75

LOT xx xx xx xxxxx/xx