


Posizionamento


Selezionare la dimensione adeguata di SecurAcath® corrispondente al diametro del catetere in uso. Se il catetere ha diametro non corrispondente ad un numero intero in French (es. 6.5F), si scelga la dimensione di SecurAcath più piccola ad esempio con un catetere da 8.5F si scelga un SecurAcath da 8F.




- Ripiegare la base di SecurAcath verso il basso fino a che le punte dei perni di ancoraggio non si uniscono
- Sollevare il catetere per visualizzare il sito di inserimento

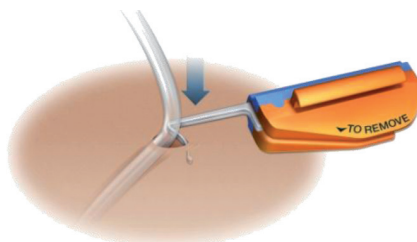


- Mantenere ripiegata la base obliquamente rispetto al piano cutaneo e inserire le punte dei perni di ancoraggio nel sito di inserimento fino a che il segmento ricurvo degli stessi non risulta più visibile

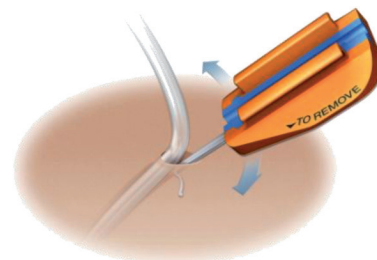


- Rilasciare la base per permetterne l'apertura ed il ritorno alla configurazione originale piatta
- Tirare delicatamente la base per assicurarsi che i perni di ancoraggio siano completamente aperti al di sotto del piano cutaneo

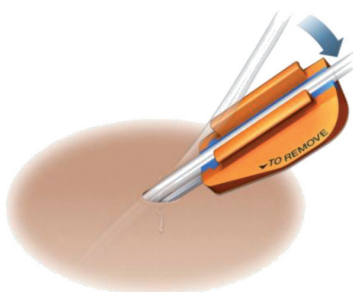

- Allineare il catetere con il solco blu presente nella base
- Assicurarsi che il tubo del catetere e la base siano puliti ed asciutti

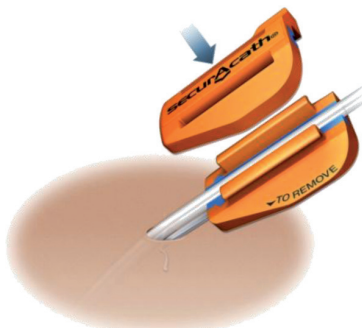

- Posizionare la copertura sulla base
- Premere fermamente la copertura e la base l'una contro l'altra
- Controllare ed assicurarsi che la copertura sia completamente incastrata nella base

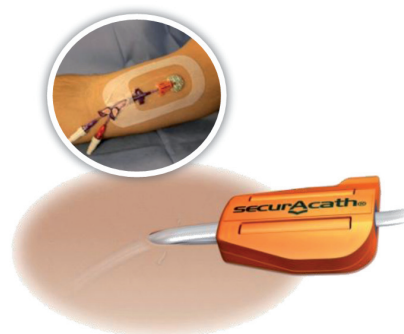

- Il catetere è ora fissato
- Il device SecurAcath si dispone piatto sulla cute e assicurerà il catetere in posizione per l'intera durata della terapia
- Opzionale - la copertura può essere rimossa e riposizionata nel caso in cui sia necessario riposizionare in lunghezza il catetere
- Medicare il sito di inserimento seguendo il protocollo standard in uso




SEDA S.p.A.

PER ORDINARE: contattare il Servizio Clienti **SEDA SpA** al numero **02.48.424.1** (da lun. a ven. dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00) o inviare una email all'indirizzo **sd@seda-spa.it**
Ulteriori informazioni reperibili sul sito **www.seda-spa.it**


CE 0473

interrad
MEDICAL


Rimozione

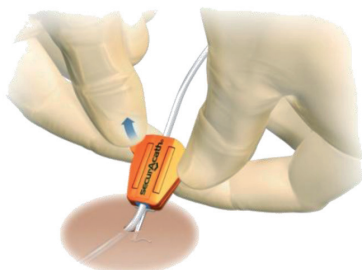

- Rimuovere la copertura posizionando un dito sotto al device per stabilizzarlo
- Afferrare la linguetta sulla copertura con l'altra mano

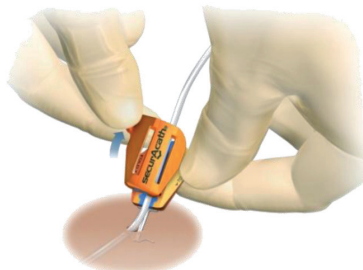


- Sollevare la linguetta per separare completamente la copertura dalla base del SecurAcath

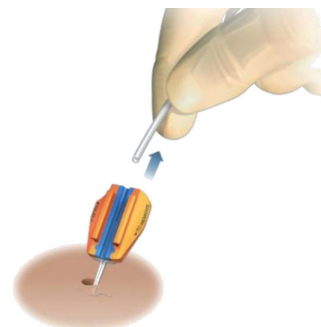


- Rimuovere il catetere - non applicare una forza eccessiva
- Mantenere premuto il sito di inserimento per ottenere emostasi

Opzione 1: Piegare la base

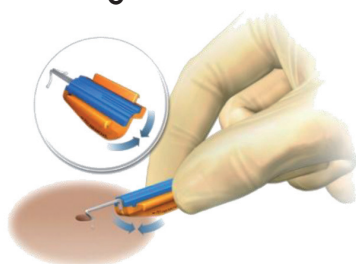


- Ripiegare la base lungo l'asse richiudendola verso il basso
- Posizionare un terzo dito sul retro della base stessa per aiutare durante la fase di piega del componente

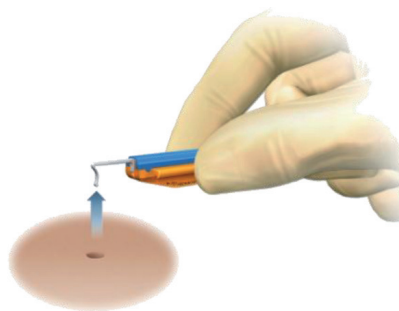

- Posizionare una mano vicino al punto di inserimento in modo da stabilizzare il tessuto
- Mantenere la base così piegata orizzontale rispetto al piano cutaneo e sollevare i perni di ancoraggio estraendoli dal punto di inserimento
- Il movimento di estrazione dei perni di ancoraggio dovrebbe essere uno "strappo" il più possibile rapido e sicuro

Opzione 2: Tagliare la base

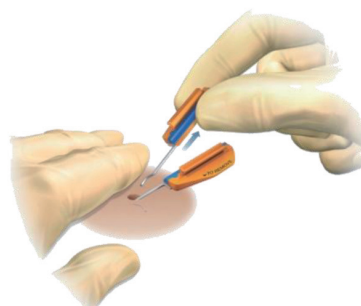

- Utilizzare una forbice a punte smusse (Metzenbaum, Mayo o simili) per tagliare la base a metà longitudinalmente lungo la scanalatura blu

- Posizionare una mano vicino al punto di inserimento in modo da stabilizzare il tessuto
- Applicare un movimento di estrazione a "strappo" il più possibile rapido e sicuro per ciascuna delle due metà della base dei perni di ancoraggio
- I perni di ancoraggio flessibili si raddrizzeranno durante l'estrazione senza causare lesioni o traumi nei tessuti



SEDA S.p.A.

PER ORDINARE: contattare il Servizio Clienti **SEDA SpA** al numero **02.48.424.1** (da lun. a ven. dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00) o inviare una email all'indirizzo **sd@seda-spa.it**
Ulteriori informazioni reperibili sul sito **www.seda-spa.it**

CE 0473

